



myMMX[®]

**ANVÄNDARGUIDE
FÖR myMMX Varseblivning
på PC**

Copyright

© nWise AB 2020 –

Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsfriskrivning

Ingen del av detta dokument får reproduceras i någon form utan upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd.

Innehållet i detta dokument kan revideras utan föregående meddelande på grund av utveckling inom metodik, design och tillverkning. nWise ansvarar inte för eventuella fel eller skador av något slag som uppstår på grund av användningen av detta dokument.

Varumärken

MMX® är ett registrerat varumärke som tillhör nWise AB.

Företags- och produktnamn omnämnda i detta dokument är varumärken som tillhör respektive företag. Omnämmandet av produkter från tredje part är endast för informativt syfte och utgör varken en uppmaning eller rekommendation. nWise tar inget ansvar beträffande funktionen i dessa produkter.

Samtliga varumärken tillhör sina respektive ägare.

Innehåll

1	Välkommen till myMMX® Varseblivning	4
1.1	Innan du installerar myMMX® Varseblivning.....	4
1.2	Så här använder du denna guide	4
2	Installation	5
2.1	Koppla in.....	5
2.2	Sök efter enhetshanterare i Windows	5
2.3	Välj Port (COM)	6
2.4	Välj utrustning.....	6
2.5	Drivrutin	7
3	Koppla upp till din varseblivning.....	7

1 Välkommen till myMMX® Varseblivning

Med myMMX® Varseblivning kan du koppla ringsignalen från myMMX® Text och myMMX® TC till standard varseblivningsenheter hemma eller på arbetsplatsen.

Den här guiden beskriver hur man installerar produkten i PC:n. Observera att efter det att du installerar Varseblivningsadapter i din PC, kan du koppla upp den mot varseblivningsutrustningen som du har hemma eller på arbetsplatsen.

myMMX® Varseblivning kan kopplas upp mot de flesta varseblivningssystem som levereras på den svenska marknaden enligt avtal med Regionernas hjälpmedelscentraler.

1.1 Innan du installerar myMMX® Varseblivning

Innan du börjar använda myMMX text, kontrollera att:

- Kontrollera att du har installerat myMMX® på din PC och att din utrustning fungerar.
- Kontrollera att din utrustning för varseblivning är installerad och fungerar.

1.2 Så här använder du denna guide

Ta dig tid till att bekanta dig med den här användarguiden och läs de avsnitt som är av intresse för dig.

2 Installation

Nedan beskrivs hur myMMX varseblivning installeras.


2.1 Koppla in

Koppla in din varseblivnings utrustning (se bild nedan) i din PCs USB-input.




2.2 Sök efter enhetshanterare i Windows

När du har kopplat in kabeln, bör du söka efter enheten i Windows. Öppna upp sökfältet på din PC och sök efter enhetshanteraren för att sedan klicka på ikonen.

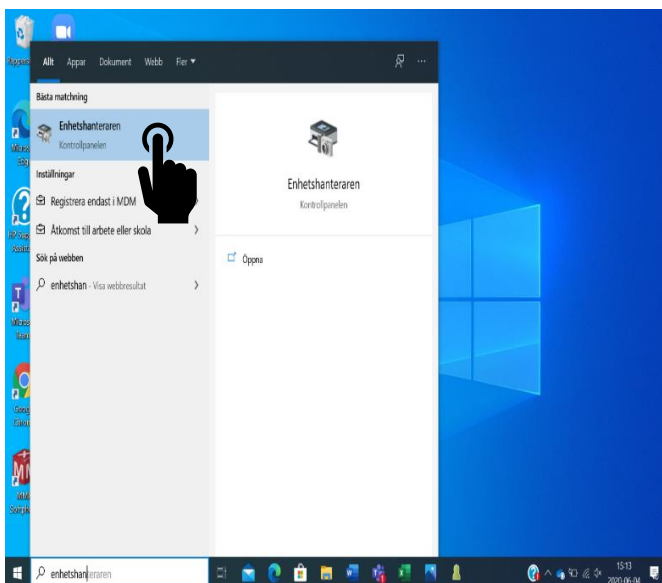


2.3 Välj Port (COM)

För att använda utrustning, måste du välja en Port (COM) i Windows. Det gör du genom att gå till portar och tryck på portar (COM) för att se din varseblivnings utrustning.

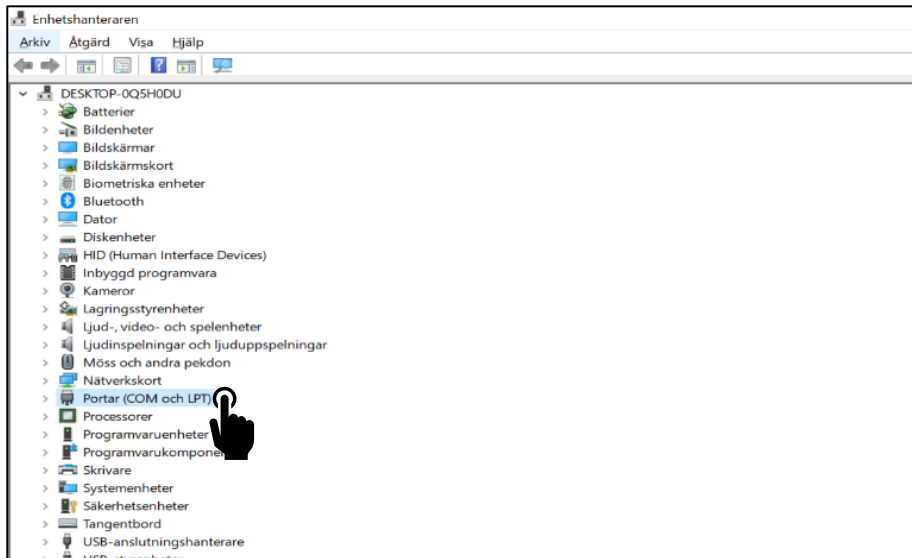

2.4 Välj utrustning


Nästa steg är att välja vilken utrustning du vill installera på din PC genom att klicka på ikonen.

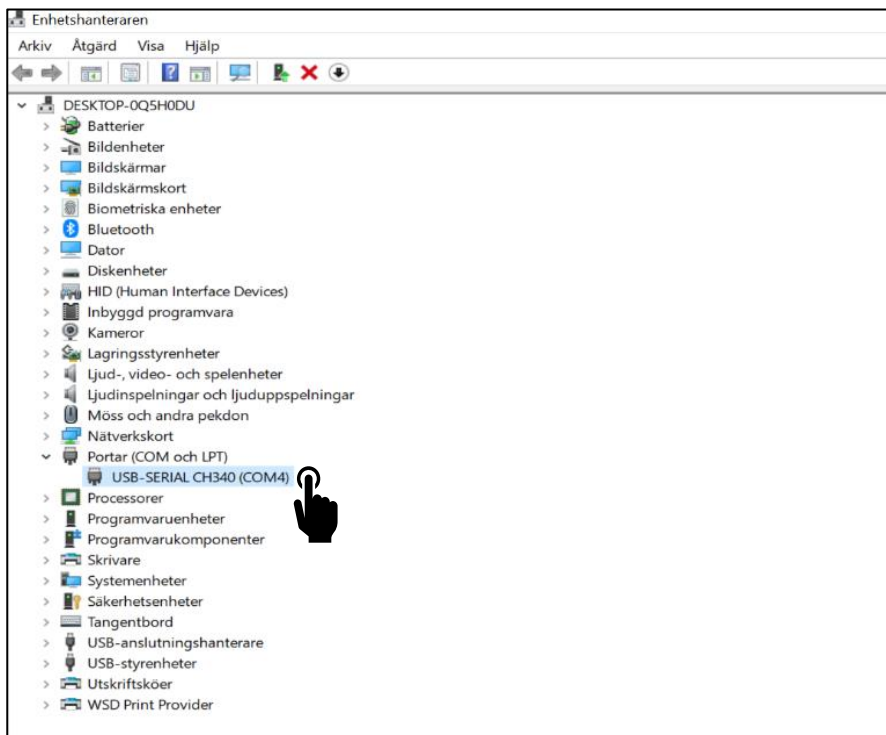

2.5 Drivrutin

För att kunna skicka en ringsignal till varseblivningen, måste du installera och/eller uppdatera drivrutinen på den valda COM port.

Du gör detta genom att välja installera/uppdatera drivrutiner, enligt bilden nedan.

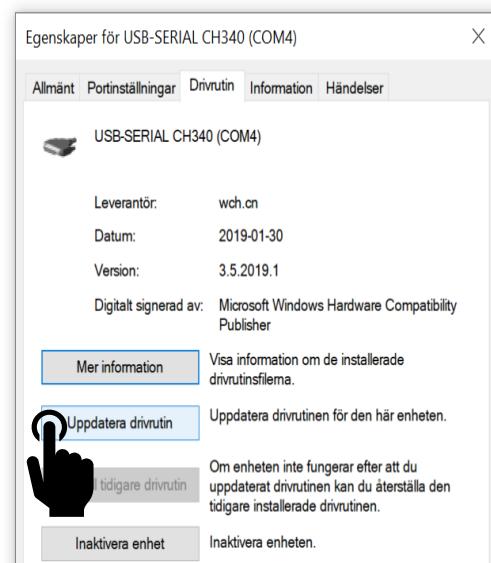

3 Koppla upp till din varseblivning

Nu är utrustningen installerat till din PC. Du kan nu koppla upp till den externa varseblivning som du har hemma eller på arbetsplatsen.

Följ gärna instruktioner som du har fått med din produkt.