



*my***MMX**

Varseblivning

Användarinstruktion

1 Vad behövs

För att använda myMMX Varseblivning behöver du:

- En iOS-enhet (mobil eller platta) med iOS 16 eller senare¹
- Telefonen ska vara uppkopplad mot internet i hemmet.
- En giltig myMMX-licens (användarnamn och lösenord)
- Bellman Visit-appen för iOS
- Bellman Visit Mobilsändare (Mobile Phone Transceiver).

(1) För leveranser till användare som använder Android och/eller myMMX Web medföljer en iPhone med myMMX-appen och Bellman Visit-appen förinstallerade.

2 Installation av app för varseblivning

Om du använder en iOS-enhet (mobil eller platta) för att ringa samtal med text-, video- eller totalkonversation med myMMX behöver du inget ytterligare för att möjliggöra varseblivning. Så länge du är inloggad i myMMX-appen kommer din varseblivning att fungera.

Du som fått en separat enhet för varseblivning behöver kontrollera att du är inloggad med ditt användarnamn och lösenord i myMMX-appen även på den enheten för att varseblivningen ska fungera.

- Öppna myMMX på din iOS enhet.
- Logga in på myMMX-appen med ditt användarnamn och lösenord.

3 Integration med din Bellmanutrusning

För att samtal till ditt myMMX-konto ska aviseras i din Bellmanutrusning behöver systemen känna till varandra.

3.1 Installation av Bellman Visit appen

Om du inte har Bellman-visit installerad på din iOS-enhet, gå in på Apple App Store.

Sök efter *Bellman Visit* och ladda ner appen.

3.2 Koppla ihop myMMX och Bellmanutrustningen

1. Öppna Bellman Visit-appen.
2. Följ anvisningarna i appen för att koppla upp den mot din Bellman Visit Mobilsändare (Mobile Phone Transceiver).
3. Kontrollera att kopplingen fungerar enligt instruktionerna i Bellman-appen.

4 Så fungerar varseblivningen

När du får ett inkommande samtal till myMMX ringer det samtidigt på alla enheter där du är inloggad. Inloggningen på iOS-enheten kommer automatiskt att:

- Trigga din Bellman-utrustning
- Ge dig varseblivning via vibration, ljus eller ljud (beroende på din Bellman-installation)

Du svarar sedan på samtalet på vilken enhet du vill; iOS, Android eller Windows.

5 Mer information om Bellman

För mer information om Bellman och deras produkter, besök: <https://bellman.com/sv>

Baksida

Copyright

© nWise AB mars 2025
Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsfriskrivning

Ingen del av detta dokument får reproduceras i någon form utan upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd.

Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande på grund av ny utveckling inom metodik, design och tillverkning. nWise ansvarar inte för eventuella fel eller skador av något slag som uppstår på grund av användningen av detta dokument.

Varumärken

MMX® är ett registrerat varumärke som innehas av nWise AB.

Angivna företags- och produktnamn är varumärken som tillhör respektive berört företag. Omnämmandet av produkter från tredje part görs endast i informativt syfte och utgör varken en uppmaning eller rekommendation. nWise tar inget ansvar beträffande funktionen hos dessa produkter.

Alla varumärken tillhör respektive rättighetsinnehavare.